
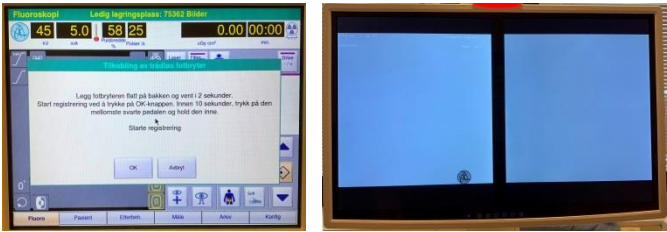
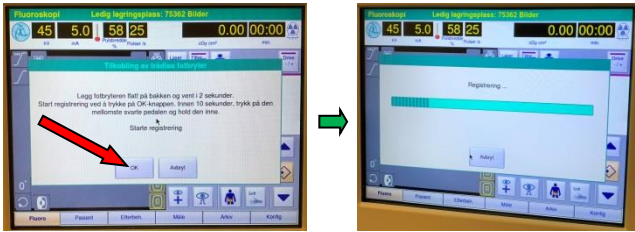



Hurtigstart C-buen (Ziehm Vision) ved temporær pacemaker.

Rekkefølge	Tekst	Bilder	Kommentarer
1	Plasser C-buen hensiktsmessig i forhold til operasjonsbordet		
2	Plasser C-buen hensiktsmessig i forhold til operatørens synsfelt		
3	Legg pedalen ved operatørens plass		
4	Slå på C-buen		
5	Vent til oppstart er ferdig		<p>Stor skjerm: 2 grå bilder</p> <p>Lille skjerm: tilkoblingsbilde</p>
6	Trykk på OK på lille skjerm og gå fort til punkt 7		<p>Grønn registreringslinje kjører</p>
7	Trykk og hold nede lille knapp på midten av pedalen inntil registreringslinjen forsvinner.		<p>C-buen, skjerm og pedal er nå aktive.</p>