


Innleggelse av kompartmenttrykk kateter, Omnibar 5fr

1. Legg medfølgende kanyle i muskellosjen og trekk nålen ut av hylsen
2. Sett beskyttelse på kateterets kontakt (ikke berør sensoren med hendene)
3. Tre kateteret i hylsen
4. Dra forsiktig ut hylsen mens kateteret holdes stødig på plass
5. Hylsen blir værende på kateteret
6. Suturer kateteret i hud/gips. Bruk blå butterfly over den hvite (ikke legg sutur rundt kateteret)
7. Koble til kateteret og trykk for kalibrering. Når 0 vises: slipp knappen


2

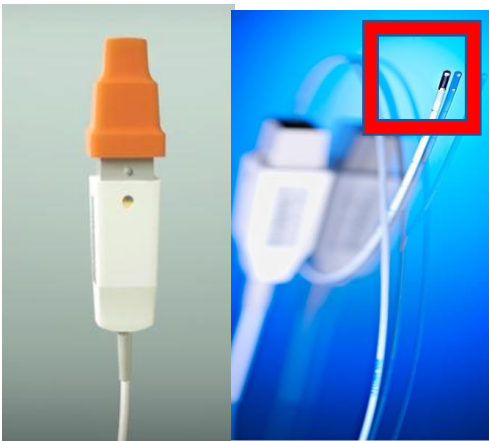


6



7

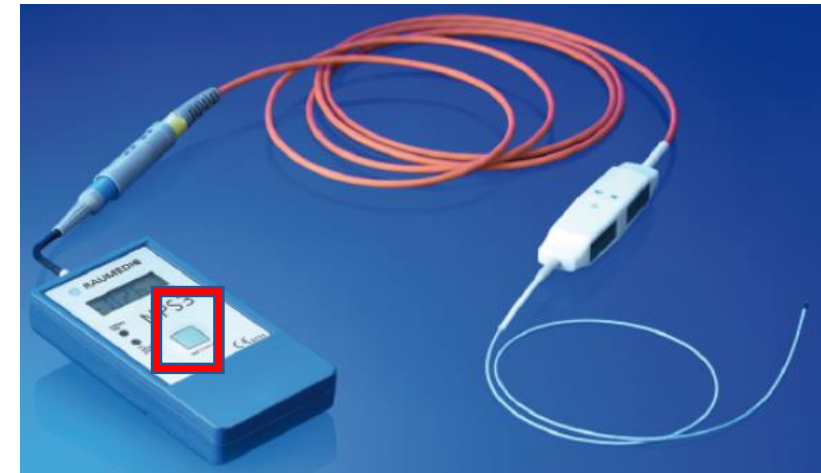


1. Slå på: Koble sammen kabel
2. Slå av: Koble fra kabel

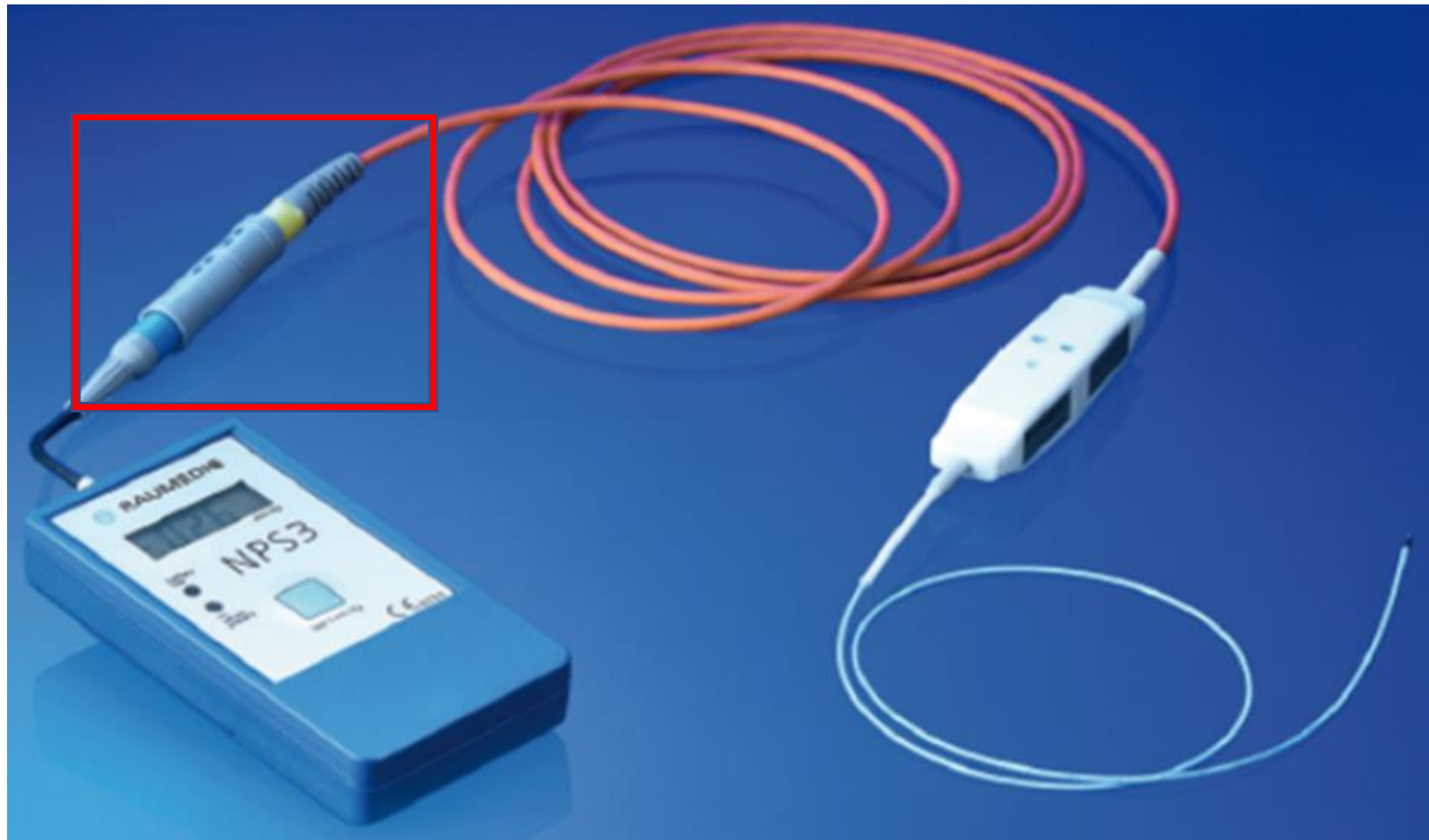

Nulling av trykk

- Gjøres etter at kateteret er lagt inn
- Hold kappen inn
- Se at «0» vises i displayet
- Slipp knappen
- Avles trykket i displayet

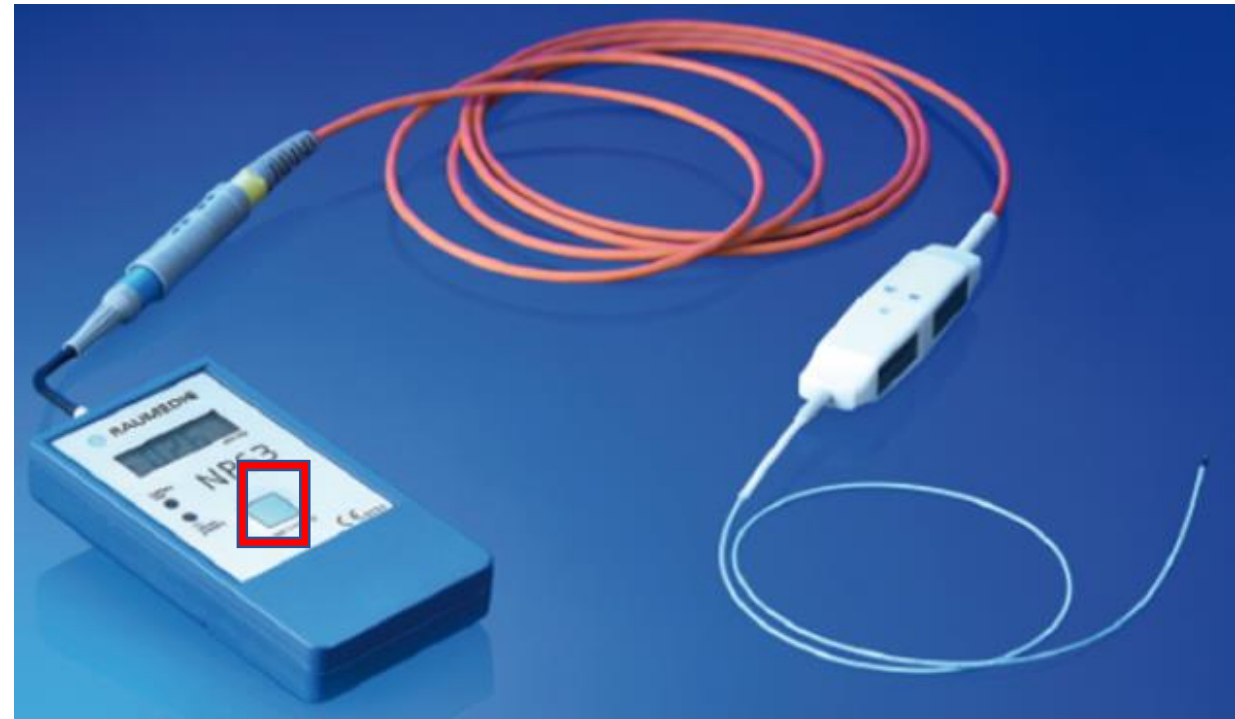

Problemløsning

- Får ikke signal
 - Sjekk alle koblinger (kateter, mellomkabel og NPS3 monitor)
 - Sjekk kontakter for inntrenging av væske
 - Sjekk alle komponenter for synlig skade
- Får ikke normal verdier i displayet
 - Sjekk at det ikke er knekk på kateteret
 - Sjekk at det ikke er satt sutur rundt kateteret
 - Sjekk kateteret for synlige skader