

Klargjøring av Hamilton-C6 på Overvåking

Respirator rengjort:	Kryss av:
• Maskin rengjort med desinfeksjonskluter	
• Skjerm rengjort med touchscreenwipes	
• Ekspirasjonsventil skiftet (<i>brukt vaskes i instrumentvaskeren og legges til lufttørring</i>)	
Respirator klargjort:	
• Maskin satt i voksen/pediatrik pasientkategori	
• Ekspirasjonsventil riktig montert, to deler – hus og membran	
• HEPA-filter plassert på inspirasjon- og ekspirasjonsport	
• Aeroneb forstøverkammer og T-stykke montert mellom Hepafilter og respiratorslange på inspirasjon. Ledning koblet til forstøverkammer.	
• Nye respiratorslanger (Hamilton-BC8022) montert	
• Flowsensor montert på Y-stykket Blank og blå sensorslange montert på blank og blå nippel på respiratoren	
• Sterilt vann lagt klart på respiratoren	
Respirator kontrollert: grønn hake = kontroll OK	
• Tetthetskontroll utført og OK Bruk rød propp til å forsegle slangesettet både under test og når maskinen er helt klargjort.	
• Flowsensor kalibrert og OK Kalibreringsadapter festet på flowsensorslange innerst ved maskinen	
• O2-sensor skal ha grønn hake. Ved rødt kryss gjennomført kalibrering av O2-sensor. (Kalibrering: Se oppslag på veggen på teknisk lager)	
Respirator satt på teknisk lager - klargjort:	
• Maskin skrudd av ved å holde inne på/av knappen i ca. 3 sekunder	
• Oksygenflasker 5 L x 2 (fylt til grønt område)	
• Maskin satt til strømnett	
Dato:	Signatur:

Oppstart:

- Velg voksen/pediatrik > 15 kg
- Velg modus enten fra hurtigvalg eller fra modusvindu høyre hjørne
- Velg mann/kvinne
- Still inn høyde
- Sjekk at det er grønne haker ved Tetthetskontroll, Flowsensor kalibrert og O2-sensor kalibrert.
Hvis tid er det likevel lurt å teste tetthet og flowsensor.
- Sterilt vann kobles til slange fra fukterkammer og henges opp over fukterkammerets nivå
- Finn frem egnet størrelse maske/HFT-grime