

Bruksanvisning

Sanitizer Surfaces S1 Våtservietter (art. 132094)

Oversikt dokumenter

Sanitizer Surfaces S1 Våtservietter

1. Bruksanvisning for Saniswiss Sanitizer Surface S1 Våtservietter (dette dok.)
2. Ofte stilte spørsmål (dette dok.)
3. Sikkerhetsdatablad (følger produktet)
4. Oversikt kliniske tester Sanitizer Surfaces S1 (på forespørsel)

Bruksområde

Til profesjonell bruk. Kan brukes på alle normale overflater, vask og desinfeksjon med samme produkt. Brukes forebyggende og ved smitte til rengjøring og desinfeksjon


STEG 1 FØR BRUK

- Følg lokale prosedyrer for rengjøring og desinfeksjon av overflater
- Bruk vernehansker ihht anbefalinger i lokale prosedyrer
- Sørg for tilstrekkelig beskyttelsesutstyr i henhold til eventuell smitterisiko.
- Fjern overflødig smuss før rengjøring og desinfeksjon.



STEG 2 UNDER BRUK


Produktet er klar til bruk, bare å ta ut en serviett. Stryk jevnt over i en s-formet bevegelser i begge retninger, så overflaten blir tilstrekkelig fuktig

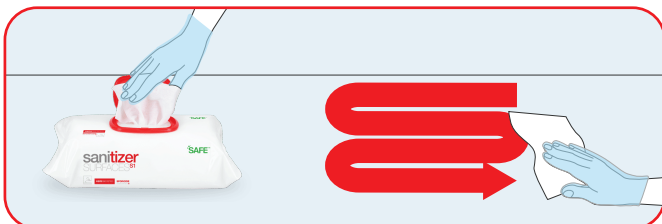

Bruk under rene forhold

Ta et tørk, kan brukes på inntil 4 kvadratmeter, tørk godt over hele flaten, påse at det blir fuktig på hele overflaten. La det tørke. Er det snakk om mistanke eller bekreftet smitt, gjelder følgende:


- Ved bakterier, virus, sopp og mykobakterier 5 min.
- Ved sporer 15 min.

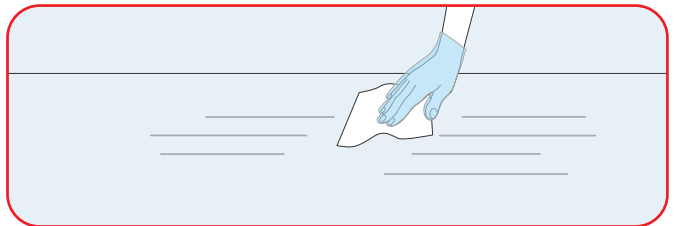

Bruk under urene forhold

Ta et tørk, vask med en klut over hele overflaten, påse at alt av urenheter fjernes. Ta en ny klut og tørk over hele overflaten slik at all overflate er fuktig. La det tørke. Er det snakk om mistanke eller bekreftet smitte gjelder følgende tørketider:

- Ved bakterier, virus, sopp og mykobakterier 5 min.
- Ved sporer 15 min.

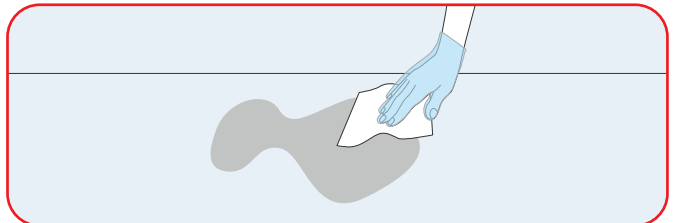

STEG 3 ETTER BRUK

La område lufttørke til kontakt tid er oppnådd. Det er ikke noen behov for etter skylling. Kun hvis det er områder i direkte kontakt med næringsmidler. Lukk alltid lokket på forpakningen etter hver gangs bruk for å hindre uttørring



Informasjon

Bruk vernehansker

Bruk hansker ihht lokale prosedyrer for rengjøring og desinfeksjon og/eller smittevern. Hvis man bruker produktet uten hansker, kan man oppleve at man får litt hvit hud på fingrene og i noen tilfeller litt kløe eller irritasjon. Dette er ufarlig, men kan oppleves unormalt. Det er organisk materiale som oksiderer med hydrogen peroksid. Dette forsvinner ganske raskt, etter en vask.

En annerledes lukt

Det vil oppfattes at det lukter litt eddik når man bruker produktet, dette er helt normalt. Man kjenner alltid lukten ved innføring av nye produkter, på samme måte som man ikke gjør det når man f.eks. har brukt alkohol-kluter i lang tid.

Kast

Man kan kaste brukt materiale ihht. beskrivelsene i sikkerhetsdatabladet / merking på etiketten

Ofte stilte spørsmål ved bruk av Saniswiss Surface S1 Våtserviett

Hvordan vet jeg at jeg må bytte til ny serviett?

Servietten skal byttes når den blir synlig skitten under rengjøring/desinfeksjonen. Eller når den begynner å bli tørr, for at den skal fukte overflaten godt. En serviett skal dekke opptil 4 kvadratmeter.

Når er våtservietten for skitten?

En serviett er for skitten når den ikke tar opp mer smuss. En litt lett grånet serviett vil ikke bli sett på som for skitten.

Når er våtservietten for tørr?

Servietten er for tørr når du ser at overflaten ikke blir fuktig. Den vil også bli vanskeligere / tyngre å dra eller tørke med på overflaten.

Skal jeg kaste servietten i spesialavfall etter bruk?

Brukte servietter er ikke farlig avfall, kan kastes i restavfall. Dersom det er mye biologisk materiale (ref. smittevern) på servietten, må man følge de lokale retningslinjer for denne type avfall.

Må det brukes hansker når våtserviettene skal brukes?

Det anbefales å bruke hansker, spesielt ved store overflater, ihht til lokale prosedyrer for rengjøring og desinfeksjon av overflater. Hendene kan bli hvite ved bruk uten hansker, det er oksidering av organisk materiale på huden, ikke farlig og kan vaskes vekk med vann. Se forøvrig sikkerhetsblad

Annet verneutstyr må det brukes?

Hansker er anbefalt å bruke. Annet verneutstyr benyttes etter lokale retningslinjer for å beskytte deg selv eller klær mot smitte mens man jobber ihht. en bestemt prosedyre, på et bestemt område.

Kan Sanitizer Surface S1 brukes på pc, tastatur, mus, mobiltelefon og annet elektronisk materiale?

Det er ved normal bruk ikke noe problem å bruke våtserviettene på dette, det fungerer utmerket. Produktet er kompatibel med de aller fleste materialer. Dersom man er usikker anbefaler vi at man prøver produktet på et lite synlig sted først, for så å se på reaksjonen. Husk at skjolder på overflaten du tester kan skyldes rester av organisk materiale eller delvis fjernet gammel materiale/smuss.

Hva skjer hvis overflaten blir hvit etter bruk?

Når man bruker hydrogen peroksid så vil den normalt oksidere organisk materiale som er til stede på overflaten man rengjør/desinfiserer, dette er bare å tørke bort med en ny klut til det forsvinner.

Det er opplevd tilfeller der overflatene har så mye gammelt smuss at servietten ikke har klart å vaske bort alt med en gang. Overflaten vil da kunne se skjoldete/hvit ut. I virkeligheten er dette at Sanitizer Surface S1 servietten har begynt å fjerne deler av oppbygde (biofilm) eller gjenværende smuss på overflaten. Skjoldene vil derfor vanligvis forsvinne over tid ved gjentatt bruk av servietten. I slike tilfeller anbefaler vi å «nullstille» overflaten med et egnet rengjøringsmiddel.

Er det noe materiale våtservietten ikke skal brukes på?

Hydrogenperoksid kan reagere på kobber, messing og marmor, så unngå disse materialene. Dette er ikke materialer som normalt benyttes på områder, hvor profesjonell bruk av våtservietten er tiltenkt. Det er lave verdier av hydrogenperoksid i denne kluten, så det vil være veldig små reaksjoner hvis det skulle oppstå.