

Beskyttelsesutstyr ved bruk av luftbåren kjemisk desinfeksjon



- Helmaske SR200 art nr: 10306350
 - Gassfilter A2B2E2, art nr 2181612
 - Partikkelfilter P3, art nr 2186218

Gjenbruk av helmaske SR 200 åndedrettsvern med gassfilter og partikkelfilter

Utføres på et desinfeksjonsrom

Utstysliste

Engangshansker

Plastforkle

Et kar som rommer utstyret

Engangs rengjøringskluter

Nøytralt rengjøringsmiddel (universalvask)

Kladd

Overflatedesinfeksjonssprit 70% eller høyere

Utførelse

- Utfør håndhygiene og ta på et plastforkle og engangshansker
- Rengjør maskens overflater med en engangs rengjøringsklut fuktet med vann og et nøytralt rengjøringsmiddel

- Ta av filtrene og demonter løse ventiler (på hver side av masken)



- Nedsenk masken, ventiler, partikkelfilteret, forfilteret, forfilterholderen i et kar med overflatedesinfeksjonsprit og la virke i 5 minutter
 - **NB! Gassfilteret (A2B2E2) skal ikke nedsenkes i karet** → påfør flatene på filteret desinfeksjonssprit med en lett fuktet klut og la tørke



- Utfør håndhygiene og ta på nye hansker
- Ta ut delene av desinfeksjonsvæsken og la det renne fra seg ved å vende på utstyret (ikke rist)
- Delene skal lufttørke på en ny kladd i et rent område i minimum 1 time
- Utfør håndhygiene og monter sammen delene før lagring i en tett beholder
- Filtrenes holdbarhet etter tatt i bruk:
 - Partikkelfilter P3: 180 dager
 - Gassfilter A2B2E2: 14 dager
 - Filtrene merkes med dato for når de utgår
 - Dokumenter filterskifte i egen liste grunnet svekkelse av merking ved gjentatt rengjøring og desinfeksjon