

Hvordan pakke sammen Auralis madrass

For å unngå unødvendig slitasje på madrassen og pumpen, er det veldig **VIKTIG** at dere følger alle steg som beskrevet nøye under pakking.



Slå av pumpen.




Åpne CPR-ventilen ved å klemme inn de røde knappene på begge sider av ventilen.



Koble ut stikkontakt, og **TA UT LEDNING** fra festet.



Surr ledningen rundt pumpen.

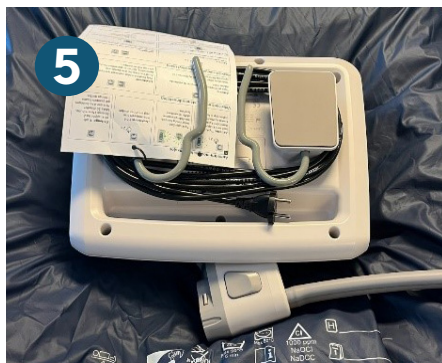

Koble slangen fra pumpen, og plasser pumpen på madrassens fotende.



Rull sammen madrassen fra fotenden, med pumpen og slangen **INNI MADRASSEN**.
Dette er viktig for å beskytte pumpen under transport!



Legg madrassen i den blå Arjo-bagen som fulgte med ved levering.

OBS!

Ved smitte: ta en **GUL, RØD** eller **SVART** sekk over madrass og pumpe **FØR** blå Arjo-bag. Skriv lapp med smittetype og legg lappen i lommen på bagen.